

### Description

**EC 25** est une solution de nettoyage par ultrasons prête à l'emploi pour éliminer les plâtres dentaires et les alginates des porte-empreintes, des instruments, etc. en acier inox, en verre, en céramique et en plastique.

Pour le nettoyage d'articles en métaux légers et de leurs alliages (Al, Mg, Zn, ...), vérifiez d'abord la compatibilité. Risque de ternissement sur les surfaces mal nickelées (par ex. vieilles porte-empreintes).

### Application et Dosage

- Non dilué dans un bain à ultrasons.
- Plâtres dentaires: température: 40-70 °C • temps de nettoyage: env. 1-3 min.
- Alginates: température: 60-70 °C • temps de nettoyage: env. 15-45 min
  - Les alginates se laissent enlever ensuite facilement des porte-empreintes.
- Après le nettoyage, brossez tout résidu et bien rincez à l'eau courante.

### Dangers et Consignes de Sécurité

Selon Règlement (CE) n° 1272/2008 [SGH] **EC 25** est classé comme dangereux (irritation oculaire).

Veuillez également à ce sujet respecter les indications mentionnées dans la fiche de données de sécurité et soyez prudent lors de la manipulation.

Veuillez signaler tout incident grave!

### Caractéristiques physico-chimiques

- Densité: 1,098 g/ml • pH (concentré): ~ 11,7.
- Ingrédients selon Annexe VII, A, Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents:
  - <5 % agents de surface anioniques.

### Elimination de la Solution usée

Les agents de surface dans notre produit sont biodégradables selon l'annexe III du Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Après une neutralisation faite selon les normes des valeurs limites locales du pH, la solution de nettoyage usée peut être déversée en canalisation à condition que les souillures apportées le permettent (observez la réglementation locale sur l'évacuation en canalisation).

Code de déchet: 07 06 01\*, „eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses“.

### Conditionnement, Stockage et Transport

- Récipients: 1 l PE-bouteille **REF** 5813700000, 5 l HDPE-bidon **REF** 5813800000, 10 l HDPE-bidon **REF** 5813900000 et 25 l HDPE-bidon **REF** 5814000000.
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine maintenu fermé à une température entre +5 °C et +35 °C. Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.
- Se conserve 5 ans à partir de la date de fabrication (voir lot sur l'étiquette).
- Le produit est classifié non dangereux pour tous les modes de transport.

### Accessoires

- Robinet (de vintage): pour 5 / 10 l bidon **REF** 8000003927 • pour 25 l bidon **REF** 8000003928.
- Gobelet doseur: 250 ml vol./5 ml-échelle **REF** 8000643 • 1000 ml vol./10 ml-échelle **REF** 8000647.

### Informations générales et exclusions

- Le concentré de nettoyage n'est pas destiné au nettoyage ou à l'hydratation de lentilles de contact.
- Seuls les instruments et autres produits médicaux approuvés pour le nettoyage à ultrasons, par immersion ou par aspersion, ainsi que réutilisables et approuvés pour le retraitement, peuvent être nettoyés avec ce produit chimique de nettoyage (voir les informations du fabricant du produit médical selon la norme EN ISO 17664).
- Lors de l'utilisation d'un appareil à ultrasons ou d'une machine de nettoyage par aspersion, les instructions du fabricant de l'appareil à ultrasons ou de l'appareil de nettoyage par aspersion doivent être suivies. Les consignes de sécurité pour les appareils de nettoyage utilisés doivent également être respectées et ne font pas partie de ces informations sur le produit.
- Le résultat du nettoyage est laissé au jugement de l'utilisateur. Vérifiez la propreté et le fonctionnement des instruments!
- Utilisez l'eau de la qualité de l'eau potable ou la qualité selon la recommandation RKI pour le rinçage.
- Après le nettoyage, la désinfection, la stérilisation ou la désinfection finale doivent être effectuées en fonction du type et de la classification du produit médical.
  
- Veuillez signaler tout incident grave lié au produit à:
  - Elma Schmidbauer GmbH · [info@elma-ultrasonic.com](mailto:info@elma-ultrasonic.com) · Tel. +49 7731 882-0
  - et à l'autorité compétente de votre pays.